



# Bedienungsanleitung



## Therapiestuhl Delta Classic inkl. Schultertragegurt

Art.Nr.: 23750

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Delta

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)



#### SICHERHEITSHINWEISE



An folgenden Teilen besteht eventuell Verletzungsgefahr (Quetschstellen) beim Aufstellen und Zusammenlegen:

- Beinpolster

Achtung:

- Auf- und Abbau des Therapiestuhls darf nur vom Masseur oder von eingewiesenen, mit dem Produkt vertrauten Personen vorgenommen werden.
- Sämtliche Einstellungen dürfen nur ohne Belastung durch den Patienten vorgenommen werden.
- Auf ebenen Untergrund achten, damit eine gute Standfestigkeit des Therapiestuhls gewährleistet ist.
- Die zulässige Belastung darf nicht überschritten werden.

## Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der Therapiestuhl „DELTA“ ist ein transportables und zusammenklappbares Massagegerät zur medizinischen Massage von Patienten durch Masseur/Masseurinnen.

Er ist ein Medizinprodukt der Klasse I nach den Vorgaben des Medizinproduktegesetzes und mit der CE-Kennzeichnung versehen.

- Ein gefahrloses Arbeiten kann nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung sichergestellt werden.

Technische Daten:

Länge:	111 cm
Breite:	46 cm
Höhe (zusammengelegt):	24 cm
Gewicht:	ca.7 kg
Bezug:	Kunstleder
Zulässige Belastung:	130 kg

AUFSTELLEN DES THERAPIESTUHL:

1. Standflächen auseinanderziehen.
2. Armauflage nach unten drücken und mittels Gurt und Klemmschloß individuell einstellen.
3. Sitzpolster hochziehen und die Gummistopfen des Sitzpolsters hinter dem Metallbolzen nach unten drücken. Die beiden Beinpolster müssen vorne auf dem Vierkanrohr aufliegen.
4. Das Kopfteil in das Rundrohr hinter der Brustpolsterplatte stecken und in die gewünschte Höhe bringen, dabei die beiden Rändelschrauben (bitte nur mit leichtem Druck) festdrehen.

ZUSAMMENLEGEN DES THERAPIESTUHL:

Verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge wie beim Aufklappen, wobei das Kopfteil nicht entnommen werden muß. Wir empfehlen, beim Transport die Armauflage und das Kopfteil bis zum Anschlag nach unten zu klappen – Therapiestuhl wird handlicher.

VERSTELLMÖGLICHKEITEN:

Kopfteil	Durch gleichzeitiges Drücken der beiden roten Druckknöpfe am Kopfteil positiv oder negativ einstellbar (Druckknöpfe müssen einrasten)
Brustpolster	Mittels Klettband abnehmbar und so nach oben, unten oder horizontal zu versetzen.
Sitzteil	Den Gummizug lösen, Metallbolzen in die gewünschte Höhe einstecken und Gummizug wieder an der Schraubenhalterung befestigen

Reinigung: Einfach feucht abwischen. Es kann auch handelsüblicher, milder Allzweckreiniger verwendet werden.

Desinfektion: BIGUAMED ist am besten geeignet. Das Desinfektionsmittel sollte keine optischen Aufheller enthalten, da sonst ein weißer Film auf dem Bezugstoff zurückbleiben kann.



**Sport-Tec**  
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255  
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0  
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de  
www.sport-tec.de